





N°	Désignation
1	4 pieds réglables pour le nivellement du sol
2	Commande au pied pour les fonctions de réglage électrique
3	Plateau de dépôt des instruments, blanc, extensible, pivotant
4	Plaques de confort pour les pieds, avec revêtement en similicuir des poignées, en option (accessoires réf. 81726_1)
5	Revêtement du coussin
6	Coussin de nuque avec fixation magnétique, en option (accessoire réf. 40023)
7	Porte-rouleau en papier
8	Commande manuelle
9	Pince de maintien pour l'adaptation du repose-jambes
10	Interrupteur principal (non visible, dos de la chaise, s'allume en vert)

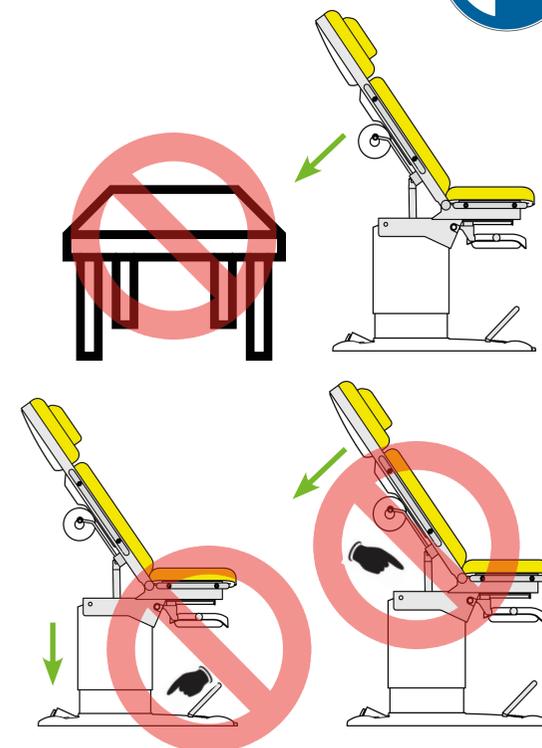

Pédale

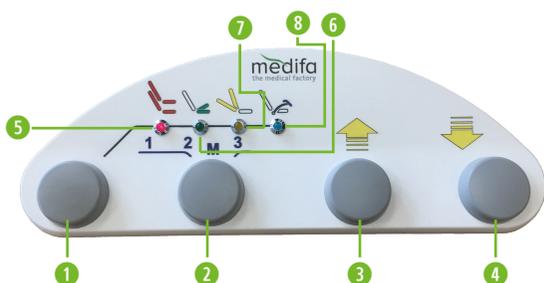

N°	Fonction	Information
1	Touche de sélection de fonction	<ul style="list-style-type: none"> <li>Présélection des différentes fonctions de positionnement. La fonction sélectionnée est indiquée par la LED correspondante.</li> <li>Présélection de la position de positionnement mémorisée M1 à M3</li> </ul>
2	Fonction mémoire	<p>Le bouton de la fonction mémoire permet de déplacer la chaise dans la position choisie.</p> <p><b>Attention : une position de mémoire souhaitée ne peut être enregistrée qu'à l'aide de la commande manuelle.</b></p>
3+4	Touches de direction	Touches de direction de la fonction respective
5	LED de réglage de la hauteur	Affichage LED de la fonction de réglage de la hauteur
6	Réglage de réglage du bassin	Affichage LED de la fonction de réglage du bassin
7	LED de réglage du dossier	Affichage LED de la fonction de réglage du dossier
8	LED de réglage de la plaque jambière	Affichage LED de la fonction de réglage de la plaque jambière



Commande manuelle



N°	Fonction	Information
1	Touche de sélection de fonction	<ul style="list-style-type: none"> <li>Présélection des différentes fonctions de positionnement. La fonction sélectionnée est indiquée par la LED correspondante.</li> <li>Présélection de la position de positionnement mémorisée M1 à M3</li> </ul>
2+3	Touches de direction	Touches de direction de la fonction respective
4	Bouton d'enregistrement	La position actuelle du fauteuil peut être mémorisée à l'aide du bouton d'enregistrement. Le niveau d'utilisateur et le numéro de la position de mémoire sous laquelle la position doit être enregistrée doivent être sélectionnés au préalable. Ensuite, il faut appuyer sur le bouton de mémoire pendant environ 2 secondes. L'écran affiche « SAVE ».
5	Bouton de fonction mémoire	Le bouton de mémoire peut être utilisé pour appliquer les positions enregistrées. En appuyant sur le bouton, la chaise se déplace automatiquement vers la position mémorisée. La position de la mémoire est définie par le niveau d'utilisateur et le numéro de la position de mémoire. Le déplacement automatique peut être interrompu à tout moment en appuyant sur n'importe quel bouton (sauf le bouton « M »).
6	Bouton de niveau d'utilisateur	Ce bouton permet de sélectionner le niveau d'utilisateur. Jusqu'à 4 utilisateurs peuvent stocker leur position de mémoire individuelle dans la chaise. Jusqu'à 3 positions peuvent être enregistrées par niveau d'utilisateur.
7	LED de réglage de la hauteur	Affichage LED de la fonction de réglage de la hauteur
8	Réglage de réglage du bassin	Affichage LED de la fonction de réglage du bassin
9	LED de réglage du dossier	Affichage LED de la fonction de réglage du dossier
10	LED de réglage de la plaque jambière (uniquement pour le modèle 400570)	Affichage LED de la fonction de réglage de la plaque jambière