





| Nº | Denominación |
|----|---|
| 1 | 4 patas ajustables para nivelar el suelo |
| 2 | Conmutador de pedal para las funciones de ajuste eléctrico |
| 3 | Cubeta de recuperación de instrumentos, blanca, extensible, giratoria |
| 4 | Apoya-piernas de Göpel incl. revestimiento de cuero sintético, opcional (accesorio N.º de art. 81717) |
| 5 | Soporte de tapicería |
| 6 | Almohadón para la nuca con fijación magnética (accesorio N.º de art. 40023) |
| 7 | Porta-rollo de papel |
| 8 | Conmutador manual |
| 9 | Pinza de sujeción para adaptación de apoya-piernas |
| 10 | Conmutador principal (no visible, en el respaldo de la silla, con luz verde) |

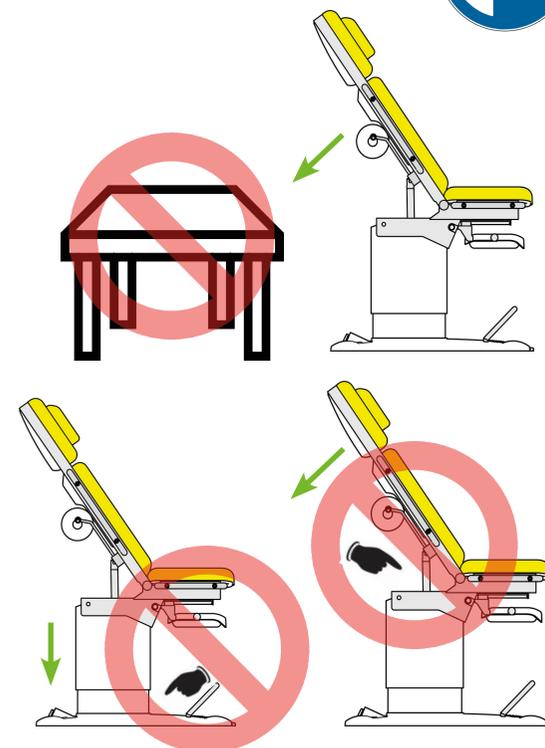


Pedal

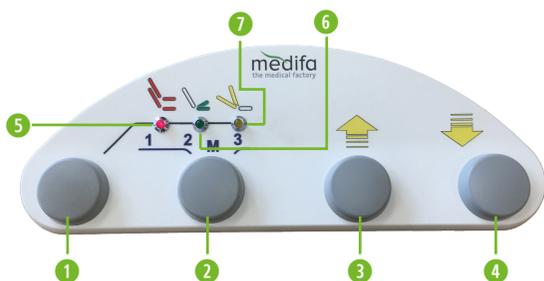

| Nº | Función | Información |
|-----|---------------------------------------|--|
| 1 | Tecla de selección de funciones | <ul style="list-style-type: none"> Preselección de las distintas funciones de almacenamiento. La función seleccionada se indica con el LED correspondiente. Preselección de la posición de colocación almacenada M1 a M3 |
| 2 | Función Memory (memoria) | <p>Con la tecla de función de memoria, la silla se puede colocar en la posición seleccionada.</p> <p>Atención: La posición de memoria deseada sólo puede almacenarse con el conmutador manual.</p> |
| 3+4 | Teclas de dirección | Teclas de dirección de la función correspondiente |
| 5 | LED de ajuste de altura | Indicador LED de la función de ajuste de la altura |
| 6 | LED de ajuste de la zona de la pelvis | Indicador LED de la función de ajuste de la zona de la pelvis |
| 7 | LED de ajuste del respaldo | Indicador LED de la función de ajuste del respaldo |



Control manual

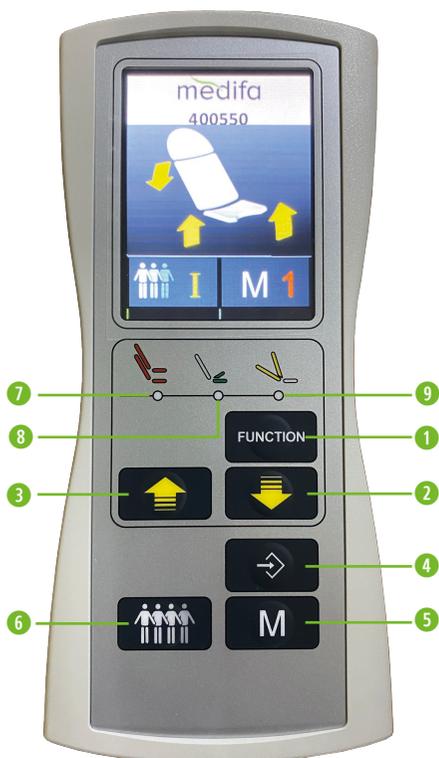

| Nº | Función | Information |
|-----|---------------------------------------|--|
| 1 | Tecla de selección de funciones | <ul style="list-style-type: none"> Preselección de las distintas funciones de almacenamiento. La función seleccionada se indica con el LED correspondiente. Preselección de la posición de colocación almacenada M1 a M3 |
| 2+3 | Teclas de dirección | Teclas de dirección de la función correspondiente |
| 4 | Tecla para almacenamiento en memoria | Con la tecla para almacenamiento en memoria se puede guardar la posición actual de la silla. Previamente se debe seleccionar el nivel de usuario y el número de posición de memoria bajo el cual se va a almacenar la posición. A continuación se debe pulsar la tecla para almacenamiento en memoria durante aprox. 2 segundos. En la pantalla aparece "SAVE" (guardar). |
| 5 | Tecla de función Memory (memoria) | La tecla Memory puede utilizarse para recuperar las posiciones almacenadas. Al pulsar la tecla, la silla se coloca automáticamente en la posición guardada. La posición de la memoria se determina en función del nivel de usuario y el número de posición de la memoria. El movimiento automático puede interrumpirse en cualquier momento pulsando cualquier tecla (excepto la tecla "M"). |
| 6 | Tecla de nivel de usuario | Con esta tecla se puede seleccionar el nivel de usuario. Se pueden almacenar hasta 4 usuarios en la silla en su posición de memoria individual. Se pueden almacenar hasta 3 posiciones por nivel de usuario. |
| 7 | LED de ajuste de altura | Indicador LED de la función de ajuste de la altura |
| 8 | LED de ajuste de la zona de la pelvis | Indicador LED de la función de ajuste de la zona de la pelvis |
| 9 | LED de ajuste del respaldo | Indicador LED de la función de ajuste del respaldo |