

Interruptor manual

### Solo interruptor manual


- 18 Estado de la batería
- 19 (Flecha verde) sin asignar
- 20 (Flecha blanca) sin asignar

### Interruptor manual y teclado de la columna

- |  |   |
|--|---|
| 1 Tecla de encendido/apagado                         | 10 FLEX (posición flex)                   |
| 2 Stop   | 11 REFLEX (posición reflex)               |
| 3 Posición normal/inversa                            | 12 BACK DN (placas dorsales hacia abajo)  |
| 4 HEIGHT (hacia arriba/hacia abajo)                  | 13 BACK UP (placas dorsales hacia arriba) |
| 5 LEVEL (posición cero)                              | 14 KIDNEY DN (puente renal hacia abajo)   |
| 6 TILT LEFT (inclinación lateral hacia la izquierda) | 15 KIDNEY UP (puente renal hacia arriba)  |
| 7 TILT RIGHT (inclinación lateral hacia la derecha)  | 16 BRAKE (freno)                          |
| 8 TREND (Trendelenburg)                              | 17 SLIDE (desplazamiento longitudinal)    |
| 9 REV. TREND (Anti-Trendelenburg)                    |   |

### Solo teclado de la columna

- 21 ACTIVATE MOVEMENTS  
Bloqueo de teclas ON/OFF
- 22 Estado de batería
- 23 LOAD (estado de carga)

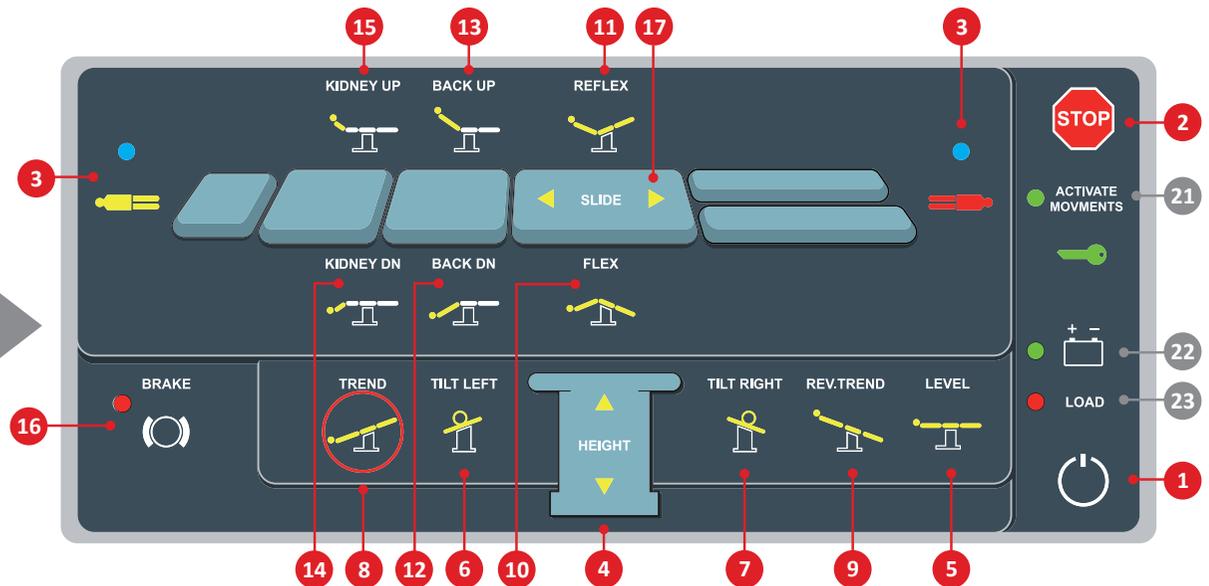

Teclado de la columna





<p><b>ENCENDER</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Para el funcionamiento</li> </ul>	<p><b>APAGAR</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Antes de cada limpieza</li> <li>• Antes de un largo periodo de inactividad</li> </ul>
---	---

## ⚠ ATENCIÓN

Esta guía rápida forma parte de las instrucciones de uso originales de la mesa de operaciones. Sin las instrucciones de uso originales, este documento NO es suficiente para garantizar un uso seguro de la mesa de operaciones medifa. Lea PRIMERO todas las instrucciones de uso originales de su mesa de operaciones medifa. Tenga especialmente en cuenta las instrucciones de seguridad, las explicaciones sobre las etiquetas de advertencia y la descripción del uso previsto que aparecen en dichas instrucciones.

### DESPLAZAR LA MESA DE OPERACIONES

**El desplazamiento de la mesa de operaciones debe realizarse siempre a la altura más baja y con ayuda de dos personas.**

**1** Antes de desplazar la mesa de operaciones, es preciso colocarla en una posición de desplazamiento:

- Colóquela en la posición cero
- Abata/desmonte los accesorios
- Coloque el tablero de mesa en la posición más baja
- Desenchufe la clavija de alimentación y el cable de conexión equipotencial

**2** Quite el freno y desplace la mesa manualmente.

Durante el desplazamiento, no la suelte. Para detenerla, párela manualmente.

### FRENAR LA MESA DE OPERACIONES

**¡Está prohibido frenar durante el desplazamiento!**

**Primero detenga la mesa de operaciones:**

**1** Detenga la mesa de operaciones.

**2** Símbolos en la pantalla del interruptor manual:



La mesa no está frenada  
Todas las funciones menos  
TREND / REV. TREND están bloqueadas.  
Pulse BRAKE durante 5-10 segundos.

### CARGAR LA MESA DE OPERACIONES

**¡No utilice cables alargadores!**

**1** Indicador durante el funcionamiento:

 Funcionamiento normal

**Cargue inmediatamente la mesa de operaciones en cuanto el indicador cambie a:**

 **0-20% de capacidad de carga**

**2** Conecte el cable de alimentación. El color del símbolo que aparece en la consola de mando cambia a VERDE. En la consola de mando no hay ningún indicador del estado de carga. El tiempo necesario para una carga completa es aproximadamente 9 horas. Durante todo el tiempo de carga, el teclado de la columna muestra, junto al indicador LOAD, un LED rojo.

**3** Desconecte la mesa de operaciones de la alimentación después del tiempo de carga indicado. La mesa de operaciones está lista para el servicio. Desconecte la mesa de operaciones durante los tiempos de inactividad.