

Télécommande manuelle

Télécommande uniquement


- 18 État batterie
- 19 (Flèche verte) sans affectation
- 20 (Flèche blanche) sans affectation

Télécommande et panneau de commande


- | | |
|----------------------------------|---|
| 1 Interrupteur Marche/Arrêt | 9 REV. TREND (Anti-Trendelenburg-déclive) |
| 2 Arrêt | 10 FLEX (position flex) |
| 3 Normal/Inverse | 11 REFLEX (position reflex) |
| 4 HEIGHT (lever/baisser) | 12 BACK DN (baisser plateau dorsal) |
| 5 LEVEL (position 0) | 13 BACK UP (monter plateau dorsal) |
| 6 TILT LEFT (latérale gauche) | 14 KIDNEY DN (baisser pont rénal) |
| 7 TILT RIGHT (latérale droite) | 15 KIDNEY UP (monter pont rénal) |
| 8 TREND (Trendelenburg-proclive) | 16 BRAKE (Freins) |
| | 17 SLIDE (translation longitudinale) |

Panneau de commande seul

- 21 ACTIVATE MOVEMENTS
Blocage/déblocage des touches
- 22 État batterie
- 23 LOAD (état de charge)

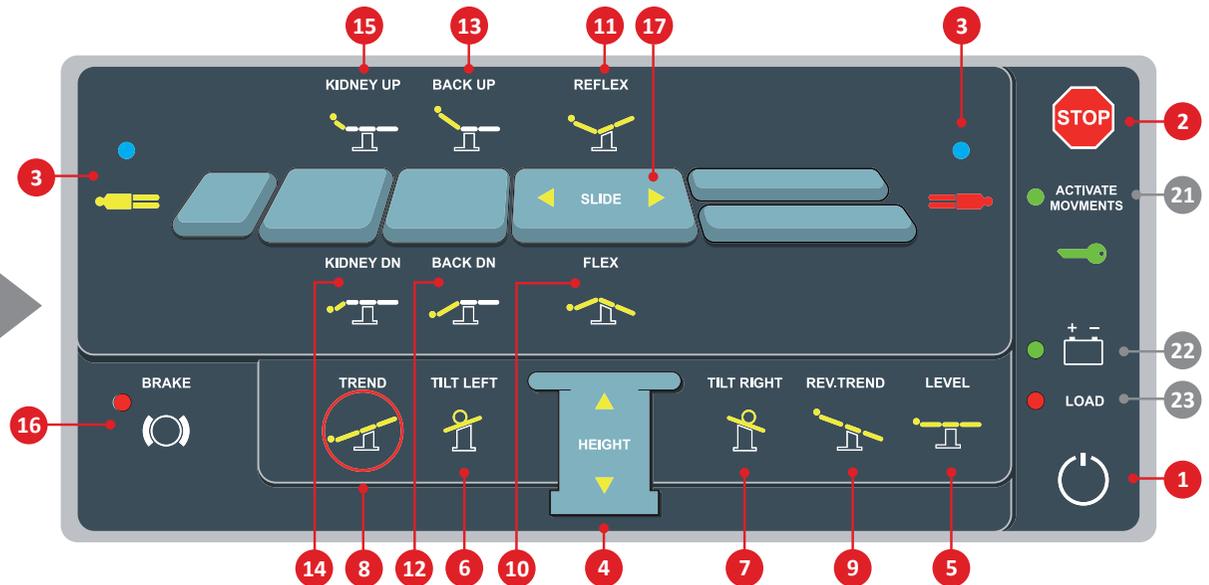

Panneau de commande

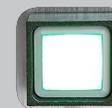

MISE SOUS TENSION

- pour travailler

MISE HORS TENSION

- avant nettoyage
- en cas d'arrêt prolongé

! AVIS

Ce bref guide fait partie intégrante du mode d'emploi d'origine de la table d'opération. Sans le mode d'emploi d'origine, il ne suffit PAS pour garantir l'utilisation de la table d'opération medifa en toute sécurité. Veuillez lire D'ABORD le mode d'emploi d'origine de votre table d'opération medifa en entier. Veuillez observer en particulier les consignes de sécurité qu'il contient, les explications sur les pictogrammes ainsi que l'utilisation conforme.

CONDUIRE LA TABLE D'OPÉRATION

La conduite de la table d'opération doit toujours s'effectuer à la plus faible hauteur et à deux personnes !

- 1 Avant de la conduire, la table d'opération doit être mise dans une position de conduite :
 - passer en position 0
 - rabattre/démonter les accessoires
 - plus basse position de la table
 - retirer la fiche secteur et le câble équipotentiel

- 2 Desserrer le frein, déplacer la table manuellement.

Ne pas relâcher pendant la conduite, arrêter par stop manuel.

FREINER LA TABLE D'OPÉRATION

Le freinage en cours de roulage est interdit !

D'abord arrêter la table !

- 1 Arrêter la table d'opération.
- 2 Symboles à l'afficheur de la télécommande :



La table est non freinée
Toutes fonctions sauf
TREND / REV. TREND sont bloquées.
Appuyer sur BRAKE pendant 5 à 10 secondes.

CHARGER LA TABLE D'OPÉRATION

Ne pas utiliser de câble prolongateur !

- 1 Affichage lors du fonctionnement :



Remettre immédiatement en charge la table d'opération lorsque l'affichage passe à :



- 2 Brancher le câble secteur. Le symbole sur la console de commande passe au VERT. Pas de témoin d'état de charge sur la console de commande. Temps de charge pour une charge complète : 9 heures env. Le panneau de commande affiche à côté de LOAD une LED rouge pendant toute la durée de charge.
- 3 Au bout du temps indiqué, débrancher du secteur la table d'opération. La table d'opération est prête à fonctionner. Lors des temps de pause, mettre la table d'opération hors tension.